



# Integramouse Air

Codice Riferimento e Codice MEPA: HWMOU05

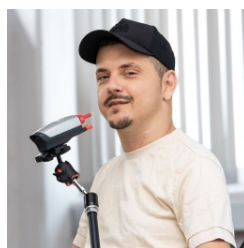

## Galleria Immagini

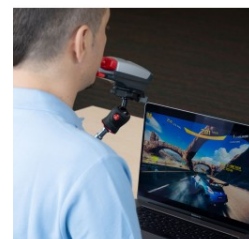

## Che cos'è Integramouse Air?

**Integramouse Air** introduce un design ergonomico e moderno, permette di gestire tutte le funzioni del mouse attraverso l'utilizzo della bocca. **Integramouse Air** propone caratteristiche innovative tecnico-funzionali come i due ulteriori comandi sotto al boccaglio per cambiare modalità di utilizzo. E' composto da un beccuccio con funzioni di joystick da stringere tra le labbra attraverso il quale si controlla il movimento del cursore.

## Che cosa fa Integramouse Air?

**Integramouse Air** è stato progettato per coloro che hanno difficoltà negli arti superiori. Integra un **microfono nel dispositivo** per gestire determinate funzioni, come comandi vocali o, semplicemente, partecipare a videochiamate. Il microfono viene attivato soltanto se collegato al pc attraverso il cavo dato in dotazione.

## Come funziona Integramouse Air?

Le funzioni del mouse, come click sinistro e click destro, vengono attivate soffiando o aspirando l'aria nel beccuccio. Questo dispositivo richiede una **leggera forza di attivazione**, progettato per coloro che hanno difficoltà nei movimenti degli arti superiori. **Integramouse Air** può essere impostato come **Joystick** e come emulazione dei tasti "**direzionali**" della tastiera unitamente ai **tasti spazio ed invio** che possono risultare utili ai **gamer**. È in grado di funzionare come mouse, **controller di gioco o tastiera**. Utilizzabile su tutte le piattaforme: **Microsoft Windows, Apple OS, Linux**. Questo dispositivo è estremamente **igienico**, la parte terminale è comodamente sostituibile e può essere sterilizzata. Integra la connessione Bluetooth simultanea

fino a 4 dispositivi e propone la funzione di scorrimento, in modo tale da semplificare la navigazione anche sui dispositivi mobili. Il microfono integrato è un supporto per assistenti vocali, dettatura e videocomunicazione.

Il prodotto è munito di **certificazione biomedicale** ed è conforme agli standard di sicurezza e testato.

Per la il **fissaggio** e la stabilizzazione dello strumento sul piano di lavoro è necessario un sistema di fissaggio ed un **braccio**, tipo Magic Arm, venduti **separatamente**.

- **Sistema Op:** Tutte le piattaforme
- **Connessione:** Bluetooth
- **Driver:** NO

**Codice nomenclatore tariffario:**

**22.36.21.006 - Emulatore di mouse tipo joystick**