

Box per Sensori 16 USB Helpibox

Codice Riferimento e Codice MEPA: HWACC12

Galleria Immagini



Che cos'è Box per Sensori 16 USB Helpibox?

Il **Box per Sensori 16 USB Helpibox** è una semplice interfaccia per sensori che non necessita di alcun driver per essere installata, viene riconosciuta automaticamente dal Sistema Operativo e si connette al PC attraverso la porta USB.

Che cosa fa?

Questo dispositivo permette di emulare i seguenti **16 tasti** della **tastiera** attraverso i sensori standard presenti sul mercato:

- [ENTER] [SPACE]
- [ARROW UP] [ARROW DOWN] [ARROW LEFT] [ARROW RIGHT]
- [8 PAD] [2 PAD] [4 PAD] [6 PAD] [5 PAD]
- [F7] [F8] [F11] [F12]

Con questo dispositivo è possibile utilizzare i sensori per controllare tutti i software che utilizzano questi tasti per gestire i comandi di input.

Altre configurazioni:

Per ottenere l'emulazione del mouse con il dispositivo occorre utilizzare l'accesso facilitato nel Sistema operativo: Doppio click su "Risorse del Computer", doppio click su "Pannello di Controllo". Selezionare e cliccare sull'icona "Accesso facilitato", selezionare "MOUSE", selezionare "Usa controllo puntatore", cliccare su "applica" e poi su "ok".

A questo punto ai numeri del tastierino numerico corrisponderanno le direzioni del mouse e pertanto agli ingressi del dispositivo corrisponderanno rispettivamente le seguenti funzioni:

- M-CLICK il sensore connesso a questo ingresso attiverà il click del mouse
- M-UP (il sensore connesso a questo ingresso attiverà il movimento in alto del puntatore)
- M-RIGHT (il sensore connesso a questo ingresso attiverà il movimento a destra del puntatore)
- M-LEFT (il sensore connesso a questo ingresso attiverà il movimento a sinistra del puntatore)
- M-DOWN (il sensore connesso a questo ingresso attiverà il movimento in basso del puntatore)

Caratteristiche tecniche:

- Dimensioni: 130x65x30 mm
- Connessione: USB

Codice nomenclatore tariffario:

24.09.24.003 - Interfaccia per sensori