

Helpy Oops

Codice Riferimento e Codice MEPA: HWDOM03



Galleria Immagini



Cos'è Helpy Oops?

Helpy Oops è l'innovativo dispositivo di **telesoccorso GSM/GPRS/GPS** pensato per l'autonomia di anziani e disabili.

Non solo **localizzatore GPS**: grazie alla possibilità di inserire una **micro SIM**, **Helpy Oops** unisce infatti le migliori tecnologie per **sistemi di telesoccorso** alle funzionalità di un vero e proprio **telefono cellulare salvavita**.

Cosa fa?

Con *Helpy Oops* invii **chiamate di soccorso** semplicemente premendo un pulsante. Puoi programmare in rubrica fino a 12 numeri di telefono; il telesoccorso **Helpy Oops** li chiamerà uno dopo l'altro fino alla risposta da parte di uno di questi, e invierà un **SMS di geolocalizzazione** del dispositivo. Speciali sensori di movimento permettono a **Helpy Oops** di inviare **richieste di soccorso automatiche** nel caso in cui rilevi una **caduta accidentale**.

Chi riceve la chiamata saprà sempre dove sei, grazie al **localizzatore GPS** integrato e all'invio automatico della tua posizione geografica tramite SMS.

Come funziona?

Tramite il **localizzatore GPS** integrato, **Helpy Oops** è in grado di geolocalizzare costantemente la persona in possesso del dispositivo e di restituirne la posizione geografica esatta in qualsiasi momento. Inoltre è possibile tracciare delle **aree geografiche "di sicurezza"** e ricevere SMS o chiamate in caso vengano oltrepassati i confini di quest'area.

Grazie al **ricevitore satellitare integrato**, puoi conoscere la posizione di **Helpy Oops** in qualsiasi momento. Basta inviare al dispositivo un **SMS** di richiesta posizione: il **localizzatore**

GPS Helpy Oops risponderà con un SMS contenente un link di **Google Maps**, grazie al quale è possibile visualizzare sul proprio smartphone la posizione rilevata dal modulo **GPS** e ottenere le indicazioni stradali per raggiungerlo.

Funzione telefono

Dispositivo di **telesoccorso** o telefono cellulare? Tutti e due. Con **Helpy Oops** ricevi ed effettui **chiamate vivavoce** in automatico o premendo semplicemente un pulsante.