


Simply Works Per iPad

Codice Riferimento e Codice MEPA: HWACC69

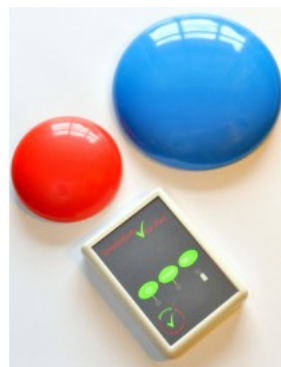

Galleria Immagini



Che cos'è Simply Works Per iPad?

Simply Works è un'interfaccia per sensori - utile per iPad, iPad Mini e iPhone - consente il collegamento di ausili come Optimax Joystick, Didakeys o sensori come Helpiswitch wireless. Si accoppia direttamente con iPad tramite Bluetooth 2.1 senza la voce del numero PIN.

Che cosa fa Simply Works Per iPad?

Simply Works Per iPad comunica con i dispositivi Apple attraverso il protocollo **Bluetooth** e non occorre nessuna procedura di installazione. Si può gestire a scansione con due sensori anche con l'App Libri (iBooks), l'applicativo di gestione dei libri digitali del mondo Apple. Le batterie ricaricabili a litio si alimentano attraverso cavo per ingresso USB.

Schema funzionale:

Codice Impostazione Tipologia Funzione Note

- 0 Contenuti multimediali avanti
- 1 Contenuti multimediali indietro
- 2 Contenuti multimediali temporizzato 15 secondi
- 3 Contenuti multimediali Mute
- 4 scansione Seleziona Impostazione su acc fac da selezionare
- 5 scansione Home Impostazione su acc fac da selezionare
- 6 Contenuti multimediali Play/pausa

- 7 tastiera spazio
- 8 tastiera invio
- 9 tastiera Tab
- A tastiera -1
- B tastiera -3
- C Contenuti multimediali Volume su
- D Contenuti multimediali Volume

- E tastiera
- F tastiera
- G tastiera
- H tastiera
- J tastiera
- L tastiera
- P scansione Scansione su Impostazione su acc fac da selezionare
- R scansione Scansione già Impostazione su acc fac da selezionare
- T scansione Scansione sinistra Impostazione su acc fac da selezionare
- U scansione Scansione destra Impostazione su acc fac da selezionare

Come funziona?

Con la tastiera **Didakeys wireless** si può scrivere su tutti gli ambienti presenti nei dispositivi Apple. Con il **joystick Optimax** si può agevolmente gestire la scrittura muovendosi nelle quattro direzioni del mouse sulla tastiera virtuale del dispositivo e dando la conferma con il click sinistro. Altrettanto utile può essere gestire i contenuti multimediali attraverso il Joystick. Con il sensore Helpiswitch si possono gestire a scansione alcune funzioni dei dispositivi, in particolare con due sensori **Helpiswitch wireless** si può scrivere sulla tastiera virtuale.

Caratteristiche tecniche:

- Connettività wireless per iPad e accesso per iPad mini
- Scansione proporzionale (utilizzando SimplyWorks Joystick)
- Scansione avanti e indietro
- Scansione della tastiera su schermo e funzionalità della tastiera completa
- Pulsante integrato per distribuire o nascondere la tastiera su schermo
- Raggio di azione: 20 m
- Dimensioni: 90mm x 64mm x 18mm
- Batteria a litio integrata ricaricabile tramite cavo USB (incluso nella confezione)

Codice nomenclatore tariffario:

24.09.24.003 - Interfaccia per Sensori

Video:

